

POMPA SAN ULTRAMED

INCLUDE:



Kit-ul este foarte simplu de utilizat, este foarte usor de ansamblat/ dezansamblat si permite spălarea completă a componentelor.

Pompa manuală pentru sân ULTRAMED - companie de renume ofera pompare rapidă și convenabilă în flacon sau recipient pentru depozitare Laptele matern este, fără îndoială, cel mai bun aliment pentru copilul tau. Medicii recomanda alaptarea copilului, deoarece laptele matern contine anticorpi, ce protejeaza copilul dumneavoastra împotriva bolilor, alergiilor și infecțiilor

Pompa ajuta mama in a iniția și a menține pe termen lung lactatia
Beneficii și caracteristici pompa ULTRAMED

Pompa manuală pentru sân vă oferă un control total asupra intensitatii și ritmului de pompare.

Acesta permite creșterea capacitatii de pompare și stabilirea ratei de pompare cea mai adecvată pentru fiecare mama.

Masaj inovator- atingere moale , potrivire perfecta la san, simularea secretiei lactate rapide

Mod de utilizare :

- asigurati-va ca toate componentele pompei sunt sterilizate
- asigurati-va ca nu aveti canalele de lactatie blocate
- ansamblati dupa schema de mai jos pompa de san
- introduceti sanul in palnia pompei , asigurandu-va ca nu toata palnia este apasata pe san , astfel incat sa se creeze un spatiu de vid , sa nu intre aerul intre san si palnia pompei.
- apasati usor manerul pompei , atat cat va simtiti confortabil
- in general mama trebuie sa foloseasca pompa aprox 10 minute pentru a extrage 60- 120 ml lapte , dar aceasta depinde de la femeie la femeie

ULTRAMED vă permite :

*** Exprimarea laptelui**



*** Hrănirea din biberon**



** Stocare în containere*



Metoda de ansamblare:

